

## VENDAS - PRODUTOS NOVOS ORIGINAIS SALVAPÉ OPLS 608 K – ROBOFOOT® KIT ACHILLES®

Suporta até 120kg

### TABELA DE TAMANHOS

| Código - Tamanho       | Número do calçado |
|------------------------|-------------------|
| 608-12/22 - TAMANHO PP | do 29 ao 34       |
| 608-13/23 - TAMANHO P  | do 34 ao 36       |
| 608-14/24 - TAMANHO M  | do 37 ao 39       |
| 608-15/25 - TAMANHO G  | do 40 ao 43       |
| 608-16/26 - TAMANHO GG | do 44 ao 46       |

Acessórios  
**ROBOFOOT**

**Robofoot®**  
**Achilles**  
**Kit**



### Instruções de uso

|   |  |                                                                                                                                                                      |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Para facilitar a colocação esteja sentado com o joelho em 90 graus. Solte todas as tiras do produto e retire o forro de espuma.                                      |
| 2 |  | Abra o forro de espuma para calçá-lo. Posicione o calcanhar no forro, acomodando o pé e a perna. Feche o forro não apertando demais e não deixando pregas ou dobras. |
| 3 |  | Encaixe o pé já vestido com o forro de espuma na bota. O calcanhar deve ficar apoiado na parte posterior da bota.                                                    |
| 4 |  | Feche em primeiro lugar a tira com fecho aderente próxima aos dedos e continue fechando as demais tiras, de baixo para cima.                                         |