

09/2025

## VENDA – BOTAS IMOBILIZADORAS Produtos novos originais Salvapé

P. 1/1

(imagens ilustrativas)  
(os valores podem ser alterados sem aviso prévio)

### OPS 608 – Robofoot<sup>®</sup> Nova Geração

**Suporta até 120kg.**



#### Características:

Plataforma injetada em polietileno rígido na cor cinza prata - maior resistência.  
Solado com discreta curva desenhada especialmente para facilitar a marcha.  
Confeccionado em látex antiderrapante com excelente resistência.  
Palmilha de sustentação confortável e com absorção de impacto, confeccionada em E.V.A., com 12mm de espessura.  
Suporte rígido para panturrilha, tornozelo e pé. Forro de espuma.  
Design anatômico com baixo perfil para facilitar a marcha. Base em plástico injetado

#### Indicações:

Fraturas estáveis na ausência de deformidades graves.  
Luxações e entorses.  
Em substituição a goteira gessada.

#### TABELA DE TAMANHOS

608-12/22 - TAMANHO PP	- Número do calçado: do 29 ao 34
608-13/23 - TAMANHO P	- Número do calçado: do 34 ao 36
608-14/24 - TAMANHO M	- Número do calçado: do 37 ao 39
608-15/25 - TAMANHO G	- Número do calçado: do 40 ao 43
608-16/26 - TAMANHO GG	- Número do calçado: do 44 ao 46

**Modelos: Curta e Longa**

### Instruções de uso



**1**  
Para facilitar a colocação esteja sentado com o joelho em 90 graus.  
Solte todas as tiras do produto e retire o forro de espuma.



**2**  
Abra o forro de espuma para calçá-lo.  
Posicione o calcanhar no forro, acomodando o pé e a perna.  
Feche o forro não apertando demais e não deixando pregas ou dobras.



**3**  
Encaixe o pé já vestido com o forro de espuma na bota.  
O calcanhar deve ficar apoiado na parte posterior da bota.



**4**  
Feche em primeiro lugar a tira com fecho aderente próxima aos dedos e continue fechando as demais tiras, debaixo para cima.