

09/2024

**LOCAÇÃO – MULETAS EM ALUMÍNIO**  
**Apenas produtos novos e seminovos**  
**Período mínimo de locação: mensal**

P. 1/1


(imagens ilustrativas)

(os valores podem ser alterados sem aviso prévio)

**Tratamento técnico exclusivo e especializado:** feito artesanalmente, antes da venda ou aluguel de nossos produtos, para facilitar e prolongar a manutenção, o conforto e a beleza por muito mais tempo.

**Visando auxiliar os pacientes e seus familiares,  
poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação.**

**Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.**

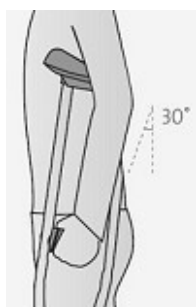

Altura de todos os modelos é regulável.

O corpo é apoiado pelas mãos, com os punhos na direção do quadril do/a paciente e com os braços dobrados Em 30°, mantendo as ponteiros em 10 cm da lateral dos pés.

Muleta Axilar: deve ficar 3 cm abaixo das axilas - medir a altura entre as axilas do/a paciente e o chão.

Muleta Canadense: medir a altura entre as mãos e o chão, com os braços dobrados em 30°.

Comparar com as medidas deste folder.

Considerar a capacidade de peso.



**OPL 01.1 – Par de Muletas Axilar**  
**Capacidade: 150 kg**

Altura regulável: de 112 cm até 134 cm

Medida do apoio da axila até o chão



**OPL 01.3 – Par de Muletas Canadense**  
**Braçadeira Fechada**  
**Capacidade: 100 kg**

Altura regulável: de 72 cm a 94 cm

Medida do apoio das mãos até o chão



**OPL 01.4 e 01.5 – Par de Muletas Canadense**  
**Braçadeira Aberta**  
**Capacidade: 120 kg e 150 kg**

Altura regulável: de 73 cm a 96 cm

Medida do apoio das mãos até o chão

Todos os produtos são entregues revisados e higienizados.

No dia a dia, a higiene pode ser feita com pano limpo, umedecido somente com um pouco de desinfetante.